



RECOMANDĂRI GENERALE DE UTILIZARE A TESTELOR RAPIDE ANTIGEN EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVĂ

1. se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandărilor producătorului;
2. se păstrează testele între +2 - +30°C;
3. se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de aluminiu;
4. se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare;
5. se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puțin 10 minute înainte de efectuarea testului;
6. se asigură permanent dezinfectia corectă a mâinilor și suprafețelor.

Pentru testarea propriu-zisă:

1. Clățiți gura copilului cu apă limpede înainte de aplicarea testului.
 2. Așteptați 5 minute înainte de colectarea salivei.
 3. Copilul își va pune buzele peste pâlnia de colectare și să colecteze salivă până când saliva ajunge la linia indicatorului (aprox. 1 ml).
 4. Răsuciți buza tubului de testare a diluantului și distribuiți toată soluția de extract în colector.
 5. Închideți capacul colectorului de salivă, amestecați colectorul masiv de cel puțin 5 ori pentru a garanta specimenul bine amestecat cu soluția de extract și așezați-l pe o suprafață plană timp de 1 minut.
 6. Scoateți dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat.
 7. Așezați dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată;
 8. Răsuciți capacul colectorului, transferați 3 picături de soluție de prelucrare a probei în spațiul de probă al dispozitivului de testare (caseta).
 9. Puneți caseta la temperatura camerei timp de 15 minute, apoi citiți rezultatul testului.
- Rezultatele trebuie interpretate în 20 de min. după finalizarea procedurii de testare.

Interpretarea rezultatelor:

- **pozitiv:** apar două linii. O linie colorată apare în zona-martor (C) și o altă linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare;
- **negativ:** o linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T);
- **neconcludent:** linia de control nu apare.