



ÚTMUTATÓ AZ ANTIGÉN GYORSTESZTEK (PAPÍRTÖLCSÉRES NYÁLTESZTEK) HASZNÁLATÁHOZ

Jelen használati útmutató a COVID-19 antigén nyáltesztek szakszerű alkalmazásához nyújt segítséget.

Általános tudnivalók:

- A teszteket +2 - +30 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni, használat előtt az alkotórészek legyenek szobahőmérsékletűek.
- Az alumínium védőfólia felbontása után a tesztet azonnal fel kell használni (legtöbb 15 percen belül).
- A teszt elvégzése előtt 30 perccel tilos élelmiszereket/italokat fogyasztani.
- Fokozottan figyeljen a kezek és a felületek fertőtlenítésére!

A tesztelés lépései:

- Készítsen elő egy oldatos fiolát, vegye le a kupakját, majd helyezze bele a papírtölcsért.
- Köptesse gyermekét a tölcsérbe, kb. 1 ml nyálmintára lesz szükség.
- Vegye ki a tölcsért, és helyezze vissza a fiola kupakját.
- Rázza jól össze 10-szer a folyadékot.
- Ezután vegye ki a tesztkazettát az alumínium csomagolásból.
- Helyezze a tesztkazettát egy sima és tiszta felületre.
- Szakítsa le a fiola kupakjának tetejét a jelzésnél, majd 3 csepp mintát cseppentsen a tesztkazetta mintamélyedésébe.
- 15 perc múlva olvassa le az eredményt.
- Ne olvasson le eredményt több mint 20 perc elteltével!

A teszteredmény értelmezése az alábbi módon történik:

Pozitív: Két vonal jelenik meg. Egy színes vonal jelenik meg a kontrollterületen (C), és egy másik színes vonal a teszterületen (T).

Negatív: A kontrollterületen (C) megjelenik egy színes vonal, a teszterületen (T) pedig nem.

Érvénytelen: Nem jelenik meg a kontrollvonal (C) 15-20 perc múlva. Szintén érvénytelen a teszteredmény, ha csak a teszterületen (T) jelenik meg a vonal. Mindkét esetben ismételje meg a tesztet egy új tesztkazettán.